

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
ООО «ВИТАФОН» 198097, г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, 23
Телефоны: (812) 783-3602, 747-2648

e-mail:<info@vitafon.ru>

www.vitafon.ru

www.vsegdazdorov.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Манжета фиксирующая «Поясная» изготовлена в соответствии с действующей технической документацией (ТО 8157-002-33159359) и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____	Дата продажи _____
	Штамп предприятия торговли
Штамп ОТК	
	Подпись

В. 11-014
Т. 11-014 (С)

МАНЖЕТА ФИКСИРУЮЩАЯ «ПОЯСНАЯ»

ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ «ВИТАФОН»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Манжета предназначена для индивидуального использования и применяется для фиксации на теле виброфонов аппаратов серии «Витафон». Манжета одевается непосредственно на тело под одежду.

В комплект поставки входят:

Манжета фиксирующая 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Потребительская тара с цветным вкладышем 1 шт.

Гарантийные обязательства:

- гарантийный срок использования 6 месяцев со дня продажи;
- срок службы не менее 1 года.


Манжета предназначена для установки виброфонов на область почек (точки К), а также в области поясницы (точки F, E2, E3, E4).

Манжета состоит из ремня и двух кармашков для преобразователей. Длина ремня легко регулируется с помощью двух рамок, а кармашки легко перемещаются вдоль него.

Для использования манжеты следует:

1. Вложить виброфоны в кармашки. Кармашки расположить в соответствии с выбранными областями воздействия.

2. Зафиксировать манжету на теле так, чтобы виброфоны оказались над выбранными областями.

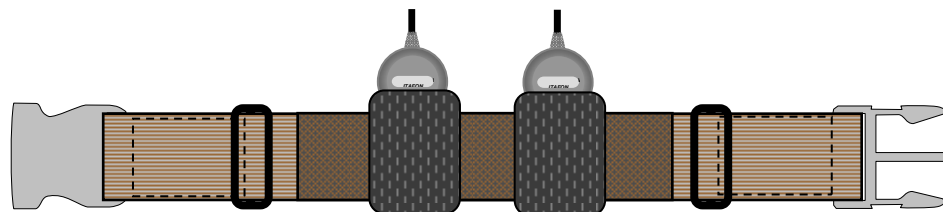

Габаритные размеры манжет, мм:

Ширина манжеты, в пределах	от 50 до 85
Длина манжеты S-M, в пределах	от 680 до 920
Длина манжеты L-XL, в пределах	от 920 до 1400

Уход за изделием:

- стирать при температуре не более 40°C;
- ручная стирка;
- сушить на горизонтальной поверхности;
- не использовать отбеливатель;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- не гладить утюгом;
- не выкручивать;
- **запрещена эксплуатация влажного изделия.**