

Рис. 1. Области воздействия С, G, M, M5, M9

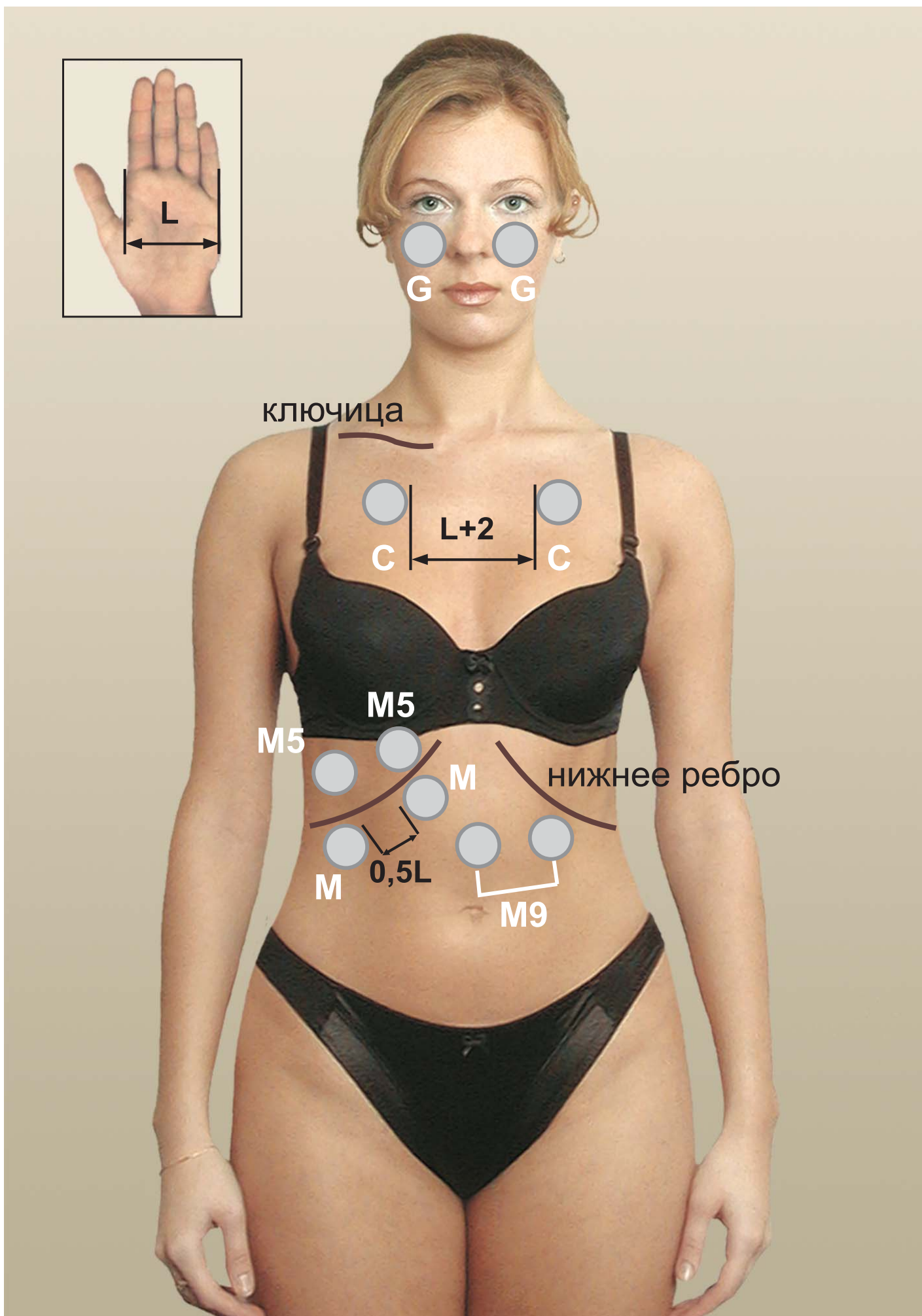



Рис. 2. Установка виброфонов в области рук



Рис. 3. Установка виброфонов в области ног



Рис. 4. Области воздействия: D1, D2, E1-E4, E11, E21, E31, К, F, E50

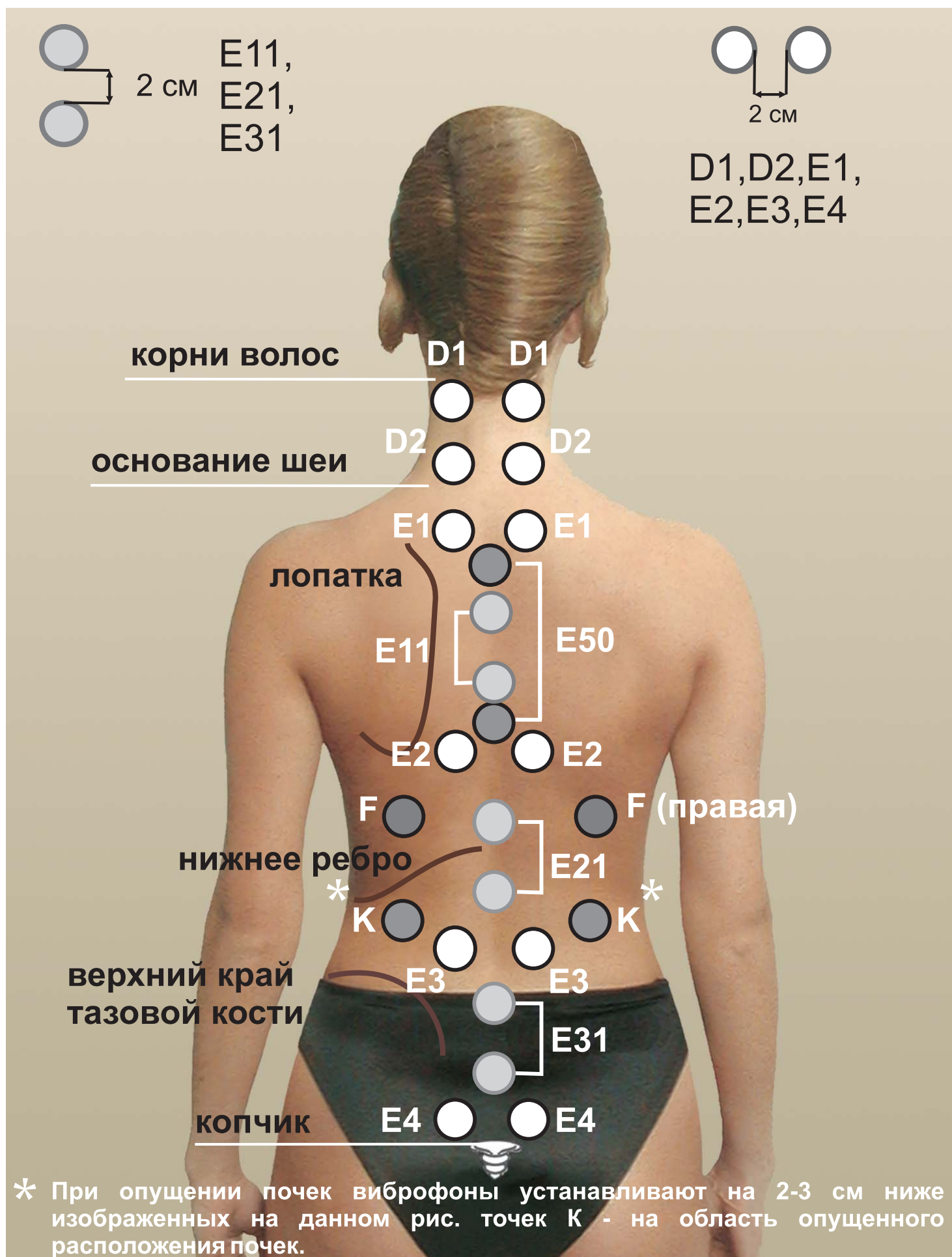

* При опущении почек виброфоны устанавливают на 2-3 см ниже изображенных на данном рис. точек К - на область опущенного расположения почек.

Рис. 5. Области воздействия E40. Виброфоны смещают от процедуры к процедуре на ширину ладони (L) вверх и вниз

Процедуры 1, 4, 7...
Базовое положение

Процедуры 2, 5, 8...

Виброфоны смещаются на ширину ладони (L) вверх от базового

Процедуры 3, 6, 9...

Виброфоны смещаются на ширину ладони (L) вниз от базового

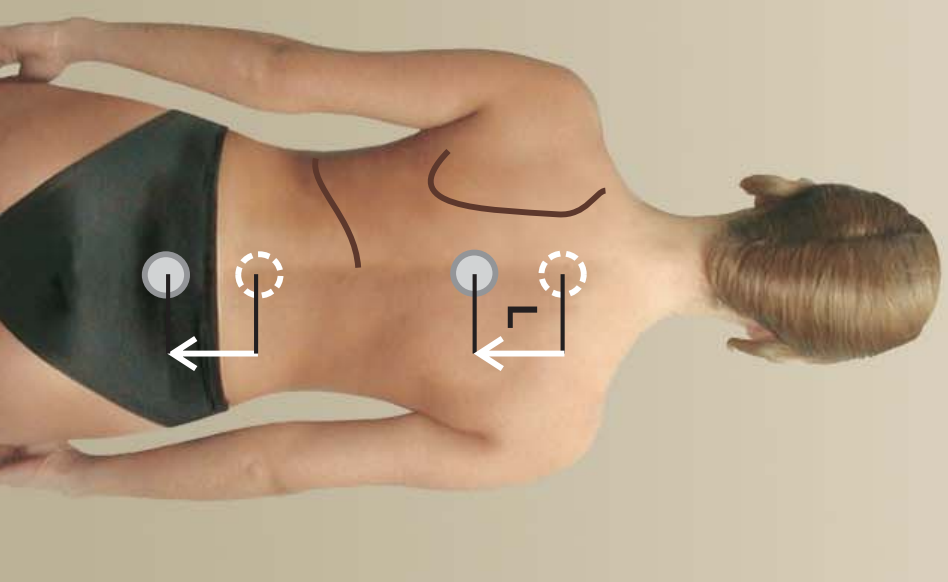
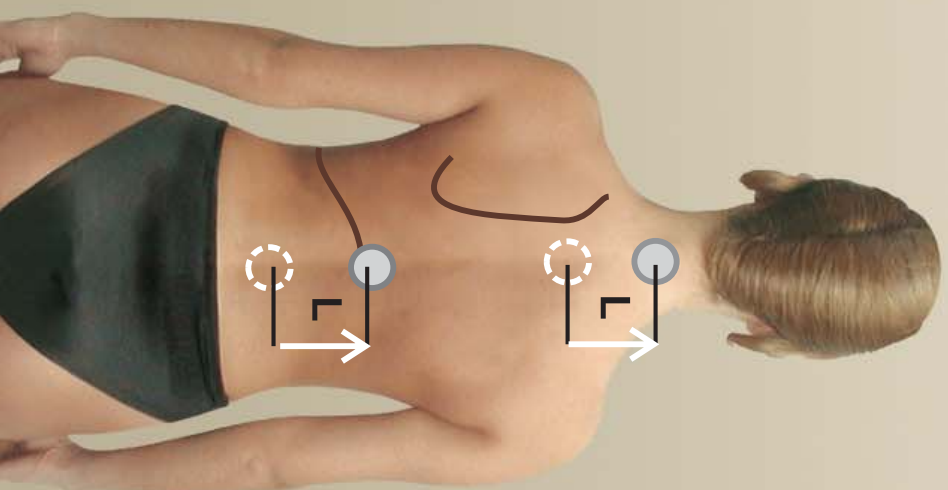
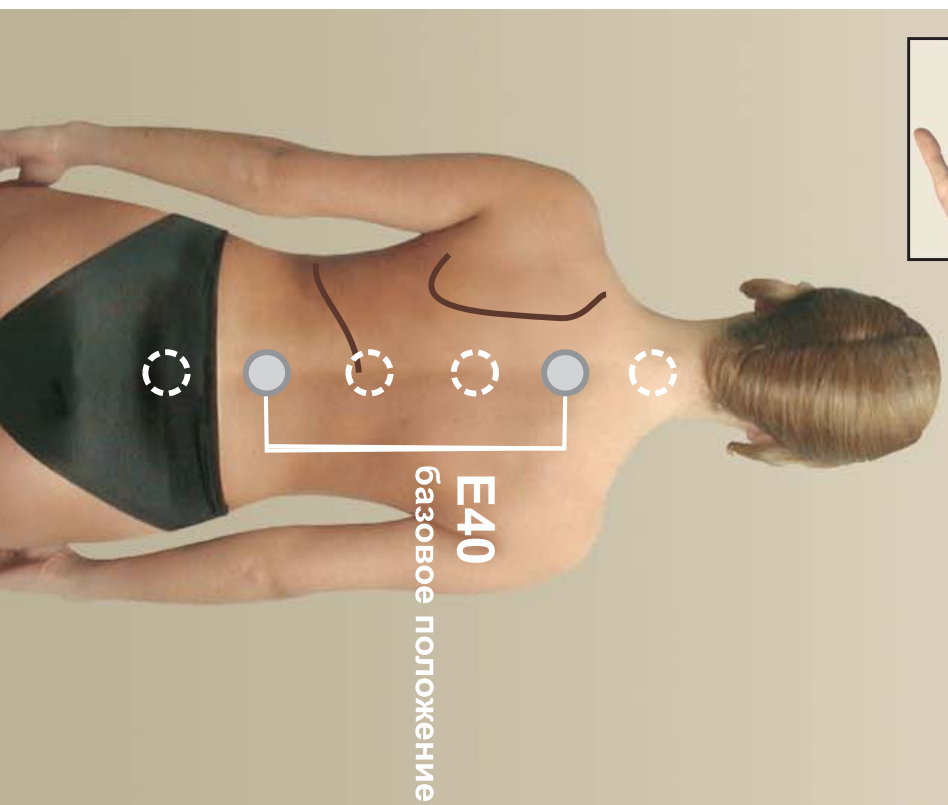
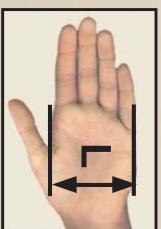


Рис. 6. Установка виброфонов в области глаза



Рис. 7. Области воздействия А, А1, В, В1

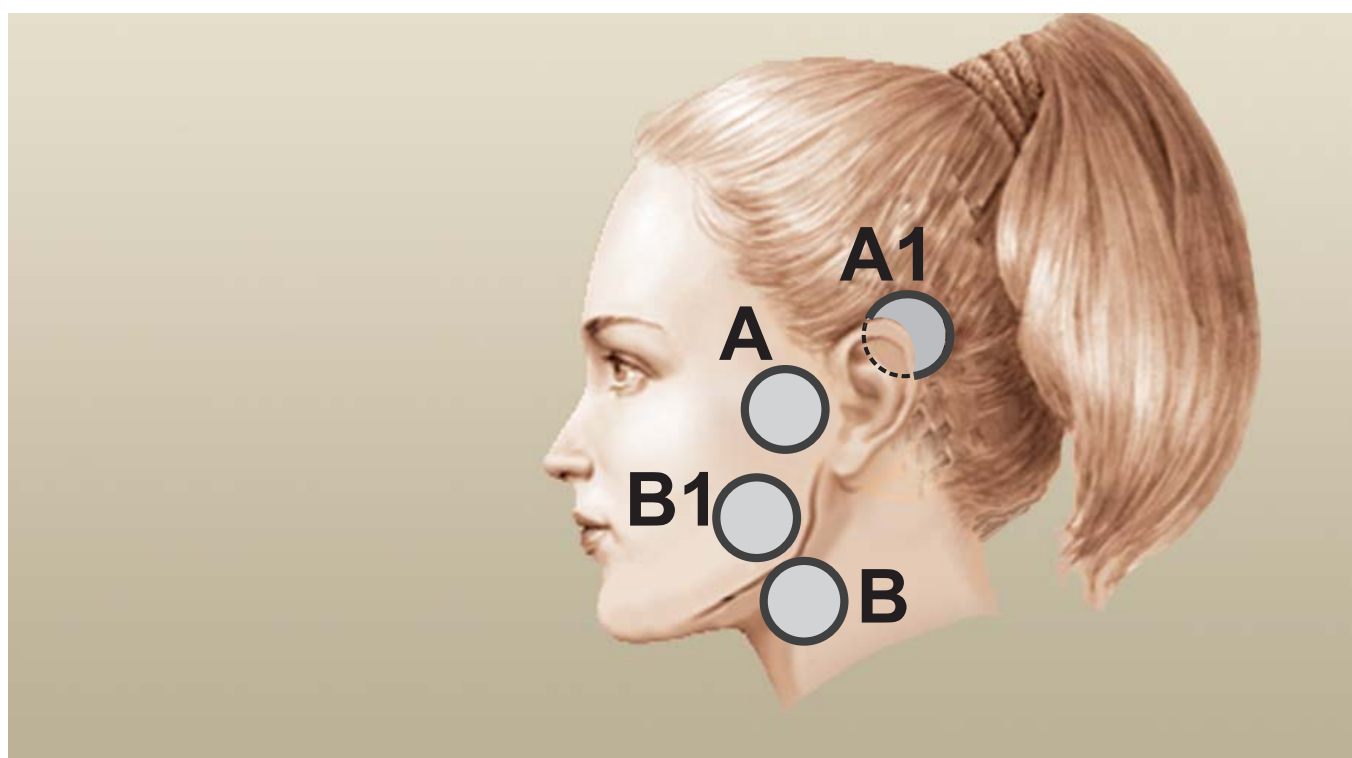


Рис. 8. Области воздействия М1- М4, ПЛУ

